

## Brukarinformation – AF SERVO

Tack för att du valt AF SERVO. AF SERVO är en ready-to-go fotledsortos för personer med droppfot, ortosen tar bort dem tillverkningsstidsfördröjningar som krävs vid individanpassade AFO: s, tack vare den vridbara ratten – som möjliggör justering i farten för användaren.

Användningen blir enkel med hjälp av AF SERVO: s vridbara ratt, istället för med ett kardborreband. Det gör att ortosen anpassar sig bättre efter användarens kroppsform och ger stöd och komfort i vardagen för personer med droppfot. Även på och avtagning underlättas med hjälp av den vridbara ratten. Dessutom säkerställer vridrattjusteringen bekväm passform och tillåter inte att ortosen går upp, vilket förhindrar sekundär skada.

### Användaranvisning

AF SERVO är en fotledsortos som är avsedd att användas vid mild droppfot efter skador som stroke, ryggrads eller nervskada, benfraktur etc. Denna produkt får endast användas efter bedömning av ortopedläkare, sjukgymnast, neurologläkare eller ortopedingenjör. Rådgör med din läkare om denna produkt är lämplig för dig

### Tänk på

1. Denna produkt är avsedd att bäras med strumpor och användas för milda droppfot och får endast ordinerats utav läkare. Om du upplever smärta, svullnad, sensationsförändringar eller får ovanliga reaktioner när du använder denna produkt, kontakta din läkare omedelbart.
2. Denna produkt är en stödjande ortos och garanteras inte förhindra skador.
3. Vrid inte ratten moturs och försök inte ta isär ratten, det kan orsaka skador på produkten.
4. Handtvätt, med kallt vatten och mild tvättmedel. Använd inte blekmedel och vrid inte ur.
5. Låt torka i skuggan och använd inte torktumlare och får ej exponeras i sol eller värme (Värmepistol eller hårfön).

### Hur används ortosen



1. Dra i rattlåset tills det klickar och öppna sedan topplocket på lämpligt sätt.



2. Skjut in foten i AF SERVO:s öppning.



3. Applicera AF SERVO på foten och tryck in ratten tills den klickar.



4. Vrid ratten medurs för att spänna åt AF SERVO så att den passar din fots form.

### Hur används ortosen tillsammans med en sko



1. Placera AF SERVO i skon och dra ut ratten tills den klickar. Öppna sedan topplocket.



2. Skjut in foten i AF SERVO:s öppning.



3. Justera topplockets läge så att det känns bra, tryck på ratten så att den klickar.



4. Vrid på ratten medurs för att spänna åt AF SERVO så att den passar din fots form.