

Dictus Hip-Knee användarinstruktioner

Dictus Hip är ett ortopedtekniskt hjälpmedel som hjälper till och underlättar gången, hjälper till att flektera/lyfta i höften och minskar risken att snubbla/ramla.

Se till att det är rätt storlek

1. Mät omkretsen på låret för att avgöra vilken Dictus-storlek som passar bäst. Storlek Medium passar ett lårmått på 30–40 cm och Large passar över 41 cm. X-Large finns tillgänglig som reservdel.



2. Mät omkretsen på midjan för att avgöra vilken Dictus-storlek som passar bäst. Storlek Medium passar ett midjemått på cirka 55–80 cm och Large passar cirka 81–130 cm.




Justering av höftbälte och lårband

3. Sätt på höftbältet och se till att spännet är centrerat samt att krokarna är vända nedåt.



4. Sätt på lårbandet och se till att kroken är centrerad.

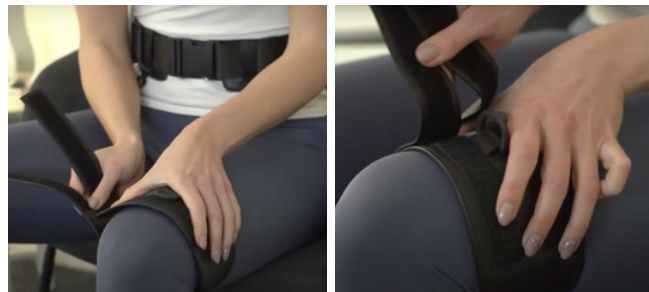

Sätta på gummibandet

5. Tryck ihop gummibandet till en ögla och trä det genom kroken på lårremmen och sedan tillbaka genom gummibandet i en ögla. Fäst bandet ordentligt i kroken. Dra gummibandet mot höftbältet och fäst det i krokarna.



Besök vår YouTube-kanal, [erimedinternational](https://www.youtube.com/channel/UCerimed), för att lära dig mer om Dictus-familjen och hur produkterna används.