

INSTRUKTION FÖR EXTENDERBAR HUMERUSFRAKTURORTOS.

Indikationer

Utmärkt för diafysära frakturer på humerus-skaftet, stöd efter avlägsnande av intern eller extern fixation, och som ett komplement till interna fixeringsprocedurer.


Ej avsedd för användning på patienter som uppvisar stora mjukdelsdefekter, allvarliga neurologiska eller vaskulära funktionsnedsättningar, överdriven vinkling/förkortning, eller om stabil riktning inte kan upprätthållas i ortosen. Ortosen kan modifieras och trimmas med en värmepistol och special-sax.

Instruktioner för användning

- 1) Humerus-frottéstrumpan appliceras genom att rulla den över armen för att sträcka sig från strax under armbågen till axelleden. Detta lager hjälper till att hålla värme och fukt borta från vävnaden och ger även patienten större komfort när plasthylsan är på plats. Ta bort alla rynkor från strumpan.
- 2) Patienten ska använda den oskadade handen för att stödja den skadade armen.
- 3) Öppna frakturstödet brett för att eliminera så mycket obehag som möjligt när du applicerar den på patientens arm. Hylsan är fodrad med skum med slutna celler, som inte har någon förmåga att hålla kvar fukt och ger en dämpande effekt.
- 4) Med patienten framtåtlutad och den frakturerade armen borta från kroppen appliceras nu humerushylsan. Med rätt passform bör den främre tungöppningen vara cirka 6-11 cm bred för att möjliggöra justering. Den valda (mest lämpliga) ortos-storleken placeras så högt som det går på den frakturerade extremiteten. Den längre deltoideus-förlängnings-delen placeras så att delen med axel-huvan ligger över tricepsmuskeln och axeln.
- 5) Tre krok- och pål-remmar håller stödet på plats. Remmarna ska fästas ordentligt, men inte för hårt, eftersom distalt ödem och obehag kan uppstå. Applicera krok- och pål-remmarna distalt först, sedan proximalt.
- 6) Den justerbara armselen består av en krage och ett manschettstycke. Den ska alltid användas vid den initiala produkt-apPLICeringen. Selen kan tas bort när smärta och obehag har minskat och armbågen kan sträckas ut helt. Det hjälper till att upprätthålla stabilitet och hjälper patienten att känna sig mer bekväm. Placera först kragen på plats från sel-fästet och fäst sedan manschettstycket. Kragstycket har inget hårdplastfoder. Remmen knäpps fast runt halsen i brösthöjd. Manschettstycket har ett foder i hårdplast. Remmens ändar måste föras in genom spännet för att bilda en ögla för att stödja handleden. Den medföljande selen kan monteras korrekt för de flesta patienter genom att lägga till säkerhetsspännet. Selen ska alltid hålla armbågen i 90 grader.

Obs: Se till att patientens axlar inte rycker när selen appliceras, eftersom det kan resultera i vargus vinkeldeformitet på frakturstället. Ortosen ska inte träffa underarmen när armbågen böjs till 90 grader.

- 7) Uppmuntra patienten att börja flexions-/extensionsövningar omedelbart efter applicering av stödet. Dessa bör fortsätta när frakturen läker och smärtan minskar. Patienten ska försöka använda handleden, handen och armen så mycket som möjligt. Ortosen kan dras åt eller lossas under hela dagen för att bibehålla bekväm kompression.

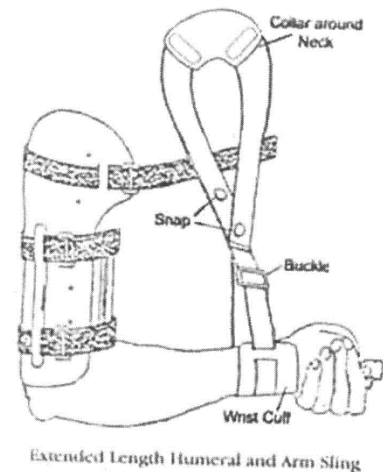

Undvik förvaring i extrem värme eller kyla.

Översättning v1 av "Instructions extended length humeral fracture brace." Detta dokument är ett komplement till det dokument som medföljer produkten.

2023-07-06 / Erimed International AB